

anleitung rücksetzen ölmeldung s101 mcu6

Diese Anleitung ist anwendbar für folgende h/p/cosmos Laufband Modelle:

quasar® (med) (3P) MCU6, ab Baujahr 2021
pulsar® (3P) MCU6, ab Baujahr 2021

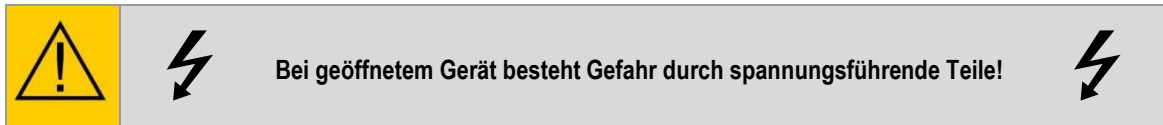
 **Entwicklung, Produktion, Verkauf & Technischer Kundendienst**
h/p/cosmos® sports & medical gmbh
Am Sportplatz 8
DE 83365 Nussdorf-Traunstein
Germany
phone +49 86 69 86 42 0
fax +49 86 69 86 42 49
service@hpcosmos.com
www.hpcosmos.com

Anleitungsversion
Revisions Stand: 1.00
Datum: 08.09.2021

inhalt

B	Sicherheitshinweise	3
C	Was wird benötigt?	3
D	Voraussichtlicher Zeitaufwand	3
E	Arbeitsvorbereitung	4
F	Arbeitsschritte	4
G	Prüfung, Dokumentation und wieder Inbetriebnahme	5
H	Entsorgung und Rücklieferung	5

B Sicherheitshinweise



Bitte beachten Sie, dass Wartungen und Reparaturen an h/p/cosmos Produkten nur von h/p/cosmos autorisierten und qualifizierten Technikern durchgeführt werden dürfen.

Eventuell entstandene Schäden durch unsachgemäßen bzw. vorschriftswidrigen Einbau unterliegen nicht der Gewährleistung von h/p/cosmos.

C Was wird benötigt?

Keine zusätzlichen Materialien/Hilfsmittel nötig

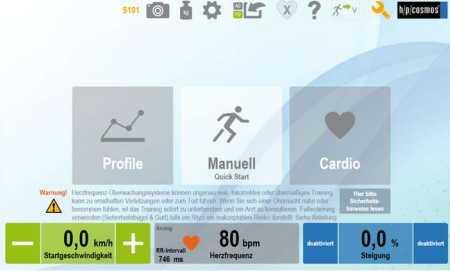
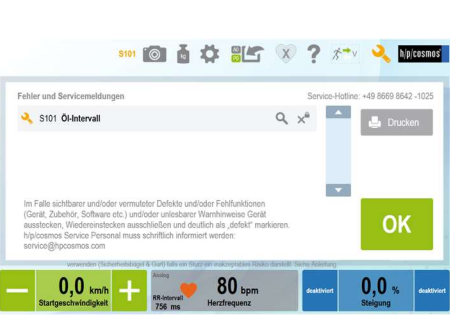

D Voraussichtlicher Zeitaufwand

Der voraussichtliche Zeitaufwand für einen von h/p/cosmos autorisierten Servicetechniker beträgt ca. eine Minute.

E Arbeitsvorbereitung

Schalten Sie das Laufband ein.

F Arbeitsschritte

Punkt	Illustration	Tätigkeit
[01]		<p>Tippen Sie auf die „S101“ Meldung.</p>
[02]		<p>Anschließend tippen Sie auf das Symbol  an.</p> <p>Geben Sie bei Aufforderung den Code „2070“ ein und bestätigen diesen mit „OK“</p> <p>Die Ölmeldung wurde somit zurückgesetzt.</p> <p>Überprüfen Sie im Anschluss den Schmierfilm. Schmieren Sie das Laufband je nach Bedarf gemäß Gebrauchsanweisung.</p>

G Prüfung, Dokumentation und wieder Inbetriebnahme

Führen Sie nach Abschluss der Arbeiten eine Schraubenkontrolle an allen ausgetauschten und demontierten Teile durch. Montieren Sie anschließend alle Abdeckungen. Die Motorhaube erst nach den elektrischen Messungen montieren.

Führen Sie eine allgemeine Funktionskontrolle am Laufband durch.

Sollten Änderungen oder Arbeiten erfolgt sein, die die Geschwindigkeit oder Steigung beeinflussen können (wie z.B. Gurttausch oder Austausch des Hubmotors), so muss die Geschwindigkeitsanzeige sowie die Steigungswinkelanzeige gemäß Anleitung durchgeführt werden und das entsprechende Formular (Displayanzeigenkontrolle) ausgefüllt werden.

Nach jedem Eingriff (elektrisch und/oder auch mechanisch) in ein h/p/cosmos Produkt ist eine sicherheitstechnische Kontrolle (STK) gemäß Anleitung durchzuführen und zu dokumentieren.

Die STK beinhaltet die elektrischen Sicherheitsmessungen nach DIN VDE 0751-1 bei Medizingeräten, bzw. DIN VDE 0701-0702 bei Sportgeräten.

Die durchgeführten Arbeiten müssen auf einem h/p/cosmos Servicebericht dokumentiert werden.

Alle Protokolle und Unterlagen zu jedem einzelnen Servicefall müssen nach Abschluss der Arbeiten an h/p/cosmos gesendet werden.

Alle notwendigen Unterlagen finden Sie unter

www.hpcosmos.com

oder auf Anfrage bei h/p/cosmos.

h/p/cosmos sports & medical gmbh
Am Sportplatz 8
DE 83365 Nussdorf – Traunstein
Germany

phone: +49 86 69 86 42 0

direct service: +49 86 69 86 42 25

fax: +49 86 69 86 42 49

email: service@hpcosmos.com

Servicebericht [cos11689de-xx]*

Prüfprotokoll [cos11690de-xx]*

*Der Index ändert sich, sobald eine neue Version des jeweiligen Protokolls verfügbar ist.

H Entsorgung und Rücklieferung

Bitte senden Sie alle ausgetauschten und/oder defekten Teile zu h/p/cosmos zurück.

Bei Ersatzteilen innerhalb der Garantie kann nur eine entsprechende Garantiegutschrift erfolgen, wenn die defekten Teile bei h/p/cosmos eingegangen sind.

Teile die außerhalb der Garantie liegen senden Sie bitte ebenfalls an h/p/cosmos zurück.

Aufgrund eines geringen Warenwerts oder hoher Versandkosten, kann auf eine Rücksendung verzichtet werden und die Teile direkt entsorgt werden, sofern h/p/cosmos diesem Vorgehen zustimmt.