



## Hinweise zur Fehlersuche

- Wenn Sie einen technischen Defekt vermuten, dürfen Sie das Gerät aus Sicherheitsgründen nicht mehr in Betrieb nehmen.
- Sollten Sie eine Störung selbst beheben, melden Sie die Störung trotzdem an h/p/cosmos, damit der Fehler in der Stammakte des Gerätes registriert werden kann.
- Vor jedem Eingriff in das Gerät muss aus Sicherheitsgründen der Netzstecker gezogen werden.

■ Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung für das Gerät in Ordnung ist, indem Sie versuchsweise ein anderes elektrisches Gerät an der Steckdose für das Gerät testen.

■ **Verwenden Sie keine Verteilersteckdosen und keine Verlängerungen**, sondern stecken Sie das Gerät direkt an eine separate Wandsteckdose! Andernfalls sind Fehlfunktionen unvermeidbar!

■ Überprüfen Sie, ob Not-Aus-Schalter (evtl. auch "extern") gezogen, und der Hauptschalter (Sicherung) angeschaltet sind.

■ Überprüfen Sie, ob evtl. Sicherheits-Lichtschränken wegen Schmutz oder Fremdkörper aktiviert sind?  
 ja  nein

■ Überprüfen Sie, ob ein Reha-Stop-Schalter aktiviert ist?  
 ja  nein

■ Falls Sie "mechanische Klopfgeräusche" während des Betriebes hören, prüfen Sie ob das Gerät einen festen Stand hat (Stellfüße beachten) und befolgen Sie die Anleitung im Handbuch: "Aufstellen des Gerätes"

■ Wann und wie oft ist der Fehler bisher aufgetreten?

---

■ Welche anderen elektrischen Geräte waren parallel noch in Betrieb?

---

■ Notieren Sie die genauen Anzeigen aller Displays nach dem aufgetretenem Fehler

<b>SPEED</b>

<b>TIME</b>

<b>INDEX</b>
ENERGY POWER

<b>DISTANCE</b>

<b>ELEVATION</b>
PROGRAM

<b>HEART RATE</b>
SEX AGE WEIGHT

■ Konnten Sie nach dem aufgetretenen Fehler das Gerät sofort mit der Taste "START" wieder starten, oder mussten Sie es zuvor mit dem Taster "OFF" ganz ausschalten?

---